

Hardwares e Suprimentos para CME

- Etiquetas
 - Etiquetas de Esterilização de CME
- Impressora de Etiqueta de Esterilização
 - Impressora de Etiquetas de Esterilização
- Leitores de Códigos 2D
- Microetiquetas Adesivas de Identificação
 - Microetiquetas Adesivas

Etiquetas

Etiquetas de Esterilização de CME

As etiquetas de identificação onde serão impressos os dados de processamento podem ser adquiridas de qualquer fornecedor. O *layout* com os dados de impressão é customizado para o cliente. A SISMETRO não comercializa etiquetas de esterilização. As mesmas deverão ser compatíveis (tamanho e material) com a impressora utilizada.

MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.

LAYOUT DE IMPRESSÃO

É o conjunto de dados e o formato (disposição) que serão impressos. O *layout* pode ser customizável para o cliente para qualquer tamanho de etiqueta, porém a SISMETRO recomenda o tamanho padrão.

ETIQUETA RECOMENDADA PARA VAPOR

Etiqueta 35 mm x 70 mm dupla face ISO Classe I;

ou


Etiqueta 35 mm x 90 mm dupla face ISO Classe I;

Estas etiquetas permitem ser destacadas do rolo e fixadas no pacote e posteriormente destacadas do pacote e fixadas atrás do prontuário.



Etiqueta dupla camada ISO Classe I

Etiquetas com marcadores ou identificadores ISO Classe I alteram sua coloração (geralmente de rosa para marrom) após submetidos a esterilização semelhantes a fita indicadora (zebrada).

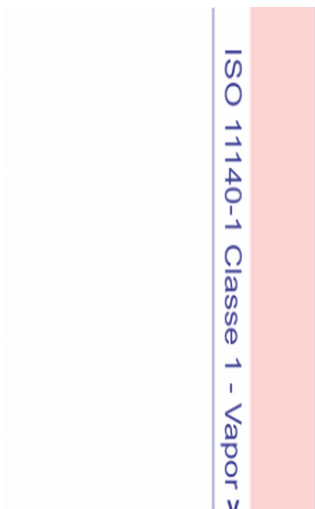

Lateral de etiqueta de esterilização ISO Classe I

ETIQUETAS PARA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

Deve ser utilizado *ribbon* de resina para alta temperatura (Não deve ser utilizado ribbon de cera).

Impressora de Etiqueta de Esterilização

Impressora de Etiquetas de Esterilização

A impressão de etiquetas de esterilização promove agilidade e segurança ao processo, pois erros de anotação e de leitura são eliminados. É possível utilizar uma mesma impressora para várias estações de trabalho (deste que estejam na mesma rede). As impressoras podem ser adquiridas de qualquer fornecedor. A SISMETRO não comercializa impressoras.

MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.

EQUIPAMENTO HOMOLOGADO

Impressora Térmica Zebra GC420t ou superior.



Impressora Térmica Zebra GC420t

EQUIPAMENTO SIMILAR

O cliente poderá utilizar sob sua responsabilidade impressoras térmicas compatíveis com o equipamento homologado.

RIBBON

Deve ser utilizado ribbon de resina para alta temperatura (Não deve ser utilizado ribbon de cera).

COMUNICAÇÃO

A etiqueta é gerada no *browser* (navegador) e será impressa via *driver* da impressora a partir da página de impressão *web*. A plataforma não acessa diretamente impressoras nem realiza transmissões de arquivos de impressão.

LAYOUT DE IMPRESSÃO

A plataforma permite selecionar qual o *layout* que será impresso. *Layout* é o modelo de etiqueta que será impresso. Exemplo: É possível selecionar para impressão a etiqueta de "Vapor" ou de "Peróxido de Hidrogênio" (necessita trocar o rolo de etiquetas da impressora ou ter outra impressora).

Dúvidas

| Dúvida | Solução | Direito |
|---|--|---------|
| É possível utilizar uma mesma impressora para imprimir etiquetas diferentes (Etiquetas com <i>layout</i> ´s diferente)? | Sim. É possível imprimir múltiplos <i>layout</i> ´s de impressão na mesma impressora, porém é necessário substituir o rolo de etiquetas (Caso o tamanho de etiqueta ou processo de esterilização seja diferente). Recomenda-se ter outra impressora para imprimir etiquetas de tamanho ou de processos diferentes (Exemplo uma pra vapor e outra para peróxido de hidrogênio). | - |
| Posso comprar outro modelo de impressora térmica? | Sim. O cliente pode comprar qualquer impressora térmica similar ou superior desde que as características técnicas sejam satisfeitas. | - |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A plataforma acessa a impressora? | Não. A plataforma não acessa a impressora nem realiza transmissões de arquivos de impressão. A etiqueta é gerada no <i>browser</i> (navegador) e será impressa via <i>driver</i> da impressora a partir da página de impressão <i>web</i> . | - |
| Onde compro a impressora? | O cliente pode comprar a impressora em qualquer fornecedor de impressoras Zebra ou de marcas similares. A impressora é um produto de mercado sendo facilmente encontrado em shopping <i>on-line</i> de produtos de informática. | - |

Leitores de Códigos 2D

Microetiquetas Adesivas de Identificação

As microetiquetas possuem um código que permite que leitores 2D efetuem a identificação do item.

Microetiquetas Adesivas

As microetiquetas adesivas possuem um código DataMatrix que permite que leitores 2D efetuem a identificação do item. As microetiquetas foram desenvolvidas para serem utilizadas em materiais que necessitam de identificação individual, porém não podem ser identificados por RFID ou gravação a laser. Materiais que não suportam a fixação de microetiqueta redonda recomenda-se a aplicação de microetiqueta com formato *band aid*. Materiais que não suportam a aplicação de nenhuma microetiqueta recomenda-se promover a identificação por meio de fita colorida juntamente com o cadastramento de material sem datamatrix no sistema.

Recomenda-se a aquisição de microetiquetas com matéria prima 3M desenvolvida para suportar o processo de esterilização.

O usuário deverá seguir minimamente os passos abaixo bem como demais instruções do fornecedor da microetiqueta.

MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.

Gestão Inteligente de Manutenção.

LOCAL DE APLICAÇÃO

Para agilizar a identificação no dia-a-dia recomenda-se que o cliente efetue uma padronização do local de aplicação da microetiqueta. O usuário deverá levar os seguintes pontos em consideração:

1. Padronizar de forma que toda a equipe saiba o local de aplicação da microetiqueta;
2. Escolher um local que não entre em contato direto com cavidades de pacientes;
3. Escolher local que tenha o mínimo de atrito possível;
4. Escolher de preferência superfícies planas. Evite áreas cortantes, cremalheiras e etc.

Exemplo de padronização de local em pinças:

Olhando a pinça de frente (com a marca ou inscrição para frente) e a ponta para baixo fixar a microetiqueta na parte superior direita como no exemplo da foto abaixo.



Padronização de local de aplicação

PREPARANDO O MATERIAL


O usuário deverá seguir os passos a abaixo para preparar o material para fixar a etiqueta:

1. Certifique que o material esteja limpo. Caso não esteja o usuário deverá realizar o processo de limpeza normal;
2. Certifique que não há resíduos de cola no local da aplicação da microetiqueta. Se necessário utilize removedor de adesivo ou benzina até remover completamente a cola;
3. Com o auxílio de um tecido umedecido com álcool 70 % efetue a limpeza do local;
4. Com o auxílio de um tecido seco remova completamente o álcool;
5. Deixe o material descansar por 5 (Cinco) minutos;
6. Até a cura total do adesivo o usuário não deverá tocar no local de aplicação com os dedos.

APLICAÇÃO DA MICROETIQUETA

Após preparar o material o usuário deverá seguir os passos a abaixo para aplicar a microetiqueta:

1. Com o auxílio de uma pinça de ponta delicada (recomenda-se pinça de sobrancelha) remova uma etiqueta da cartela. Nunca toque na microetiqueta ou no local de aplicação, mesmo que esteja de luvas, pois a oleosidade da pele e o talco de luvas interferem na fixação;
2. Aplique a microetiqueta no local padronizado;
3. Com o auxílio de um tecido seco pressione o local por 5 segundos;
4. Deixe o material descansar por 24 horas em ambiente limpo e seco. O usuário não deverá manipular, expor o material a produtos de limpeza, imergir ou mesmo lavar o material durante todo o processo de cura;
5. Esterilizar o material. A exposição da microetiqueta ao processo de esterilização ativa o processo de cura do adesivo. Caso não seja possível realizar um processo de esterilização o usuário deverá deixar o material descansar por mais 24 horas (total 48 horas). O material nunca deverá ser lavado antes da cura total do adesivo (Esterilização ou 48 horas totais de descanso).

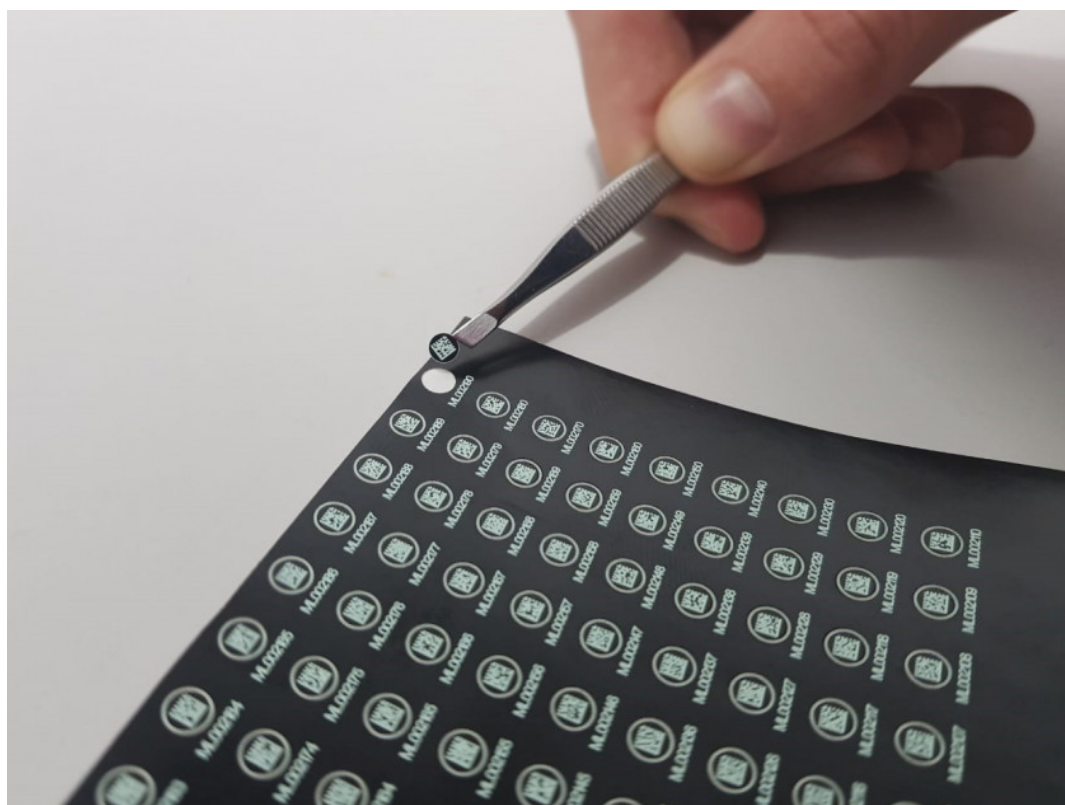

Usuário removendo uma microetiqueta da cartela.

SUBSTITUIÇÃO

O usuário deverá substituir a microetiqueta sempre que:

1. Verificar que a microetiqueta está fragmentada, deteriorada, batida, danificada ou apresentando algum tipo de dano que possa solta-la do material. A verificação da integridade da microetiqueta deve ser realizada durante o processo de preparo e

avaliação de limpeza do material;

2. Quando atingiu o período máximo de uso determinado pelo fabricante.

DÚVIDAS

| Dúvida | Solução | Direito |
|--|--|---------|
| Qual a função da microetiqueta? | Permitir a identificação individual do material. | - |
| Onde posso comprar a microetiqueta? | O cliente poderá adquirir as microetiquetas em qualquer fornecedor de sua escolha. A plataforma identifica qualquer microetiqueta desde que seja um código único. | - |
| Qual a durabilidade das microetiquetas? | A durabilidade muda circunstancialmente de acordo com produto, processo e cuidado do cliente. <u>Recomenda-se o cliente fazer uma validação da durabilidade relatada pelo fornecedor da microetiqueta.</u> | - |
| Porque a microetiqueta está apresentando fragmentação em poucos dias de uso? | Microetiquetas fabricadas com material não desenvolvido para suportar alta temperaturas. <u>Recomenda-se a aquisição de microetiquetas com matéria prima 3M desenvolvida para suportar o processo de esterilização.</u> | - |
| Porque microetiqueta está apresentando desgaste precoce? | A autoclave pode estar trabalhando com um tempo e temperatura superior a máximo suportado pela microetiqueta. OU A microetiqueta está apresentando algum defeito no lote produzido. Recomenda-se comunicar o fornecedor da microetiqueta e solicitar suporte técnico. | - |