

Embalagem de Tecidos

Criação e execução do procedimento de embalagem para tecidos na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.


PASSO A PASSO

1. MONTAR KIT


Caminho no Menu:

CME-> Embalagem-> Montar Kit

- 1.1 Identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";
- 1.2 Identifique o código da caixa / container no campo "Código do Kit" ou busque o Kit identificando os campos "Solicitante / Localização";
- 1.3 No campo "Montar Kit" deve ser selecionado o Kit padrão que será embalado;
- 1.4 Se necessário utilize o campo "Complemento ou observação sobre o kit";
- 1.5 Clique no botão "Iniciar Montagem".

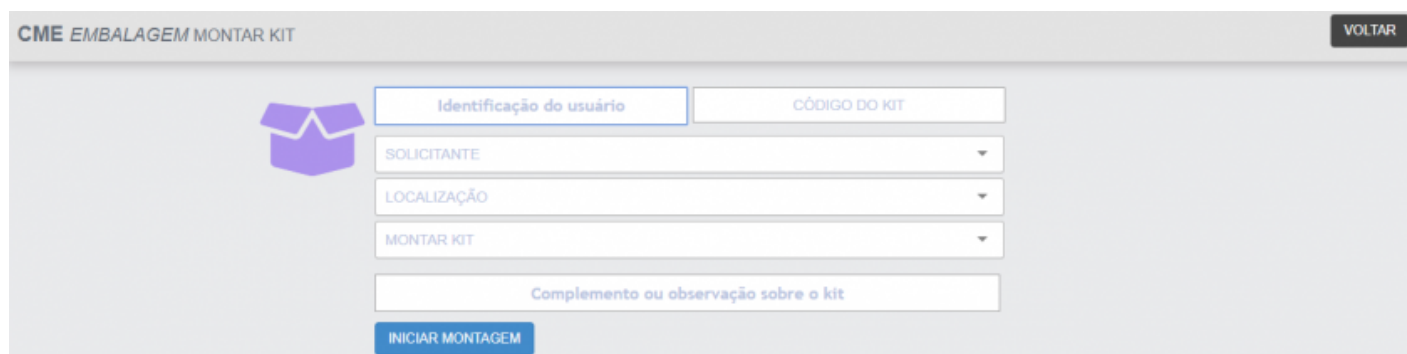

CME EMBALAGEM MONTAR KIT VOLTAR



Identificação do usuário

CÓDIGO DO KIT

SOLICITANTE

LOCALIZAÇÃO

MONTAR KIT

Complemento ou observação sobre o kit

INICIAR MONTAGEM

2. INCLUIR ITENS NO LOTE

Caminho no Menu:

CME-> Embalagem -> Listagem-> Editar / Itens do Kit

Ao iniciar a montagem de um Kit padrão, o sistema irá carregar a última versão dos itens liberada no cadastro do Kit.

2.1 Localize o patrimônio "OUTRO" requerido no Kit dentro do campo "Incluir item / Nome do item";

2.2 Selecione o invólucro da embalagem na barra de seleção logo abaixo da "Qualidade requerida dos itens";

2.3 Clique em "Fechar KIT" e identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";

2.4 Clique em "Sim, quero fechar!".

CME EMBALAGEM ITENS DO KIT S#CK-898468 Versão 9.0

Voltar IMPRIMIR ETIQUETA Incluir Novo

KIT CURATIVO #196
Versão: 9.0
Validade: 180 dias

ELAINE ENEDINO DA SILVA 26/03/2020 08:32 criou o KIT
ELAINE ENEDINO DA SILVA 26/03/2020 08:32 fechou o KIT

Qualidade requerida dos itens: **ÓTIMA**

SMS VAPOR

Quantidade abaixo do solicitado Quantidade ideal de itens Quantidade acima do solicitado Item não solicitado

Item	Tipo	Detranalix	Incluído	Requerido	Foto
OUTRO	4115		1	3	

Item	Tipo	Detranalix	ID	Requerido	Foto	Ação
OUTRO	4115	crachá: 168157	45746			

BUSCA


3. IMPRESSÃO DA ETIQUETA

Caminho no Menu:

CME -> Embalagem -> Listagem -> Etiqueta

Após a confirmação de fechamento do Kit, uma nova aba será aberta automaticamente com a etiqueta de embalagem do Kit:

OPA SIMPLES V: 10 - 1 item
Validade: 22/09/2020
S#CK-898518 Data: 26/03/2020 08:53
Abr: LUZIA INALDA GOMES DOS S
Fec: LUZIA INALDA GOMES DOS S
SMS VAPOR



A VAPOR sismetro.com

IMPRIMIR

Para imprimir, basta clicar no botão "Imprimir" ou teclar "Enter". A etiqueta adesiva deverá ser colada sobre o invólucro do kit já embalado.

Obs: todos os kits produzidos estão disponível para edição (quando ainda aberto) e consulta no menu "Embalagem -> Listagem", a página também apresenta uma legenda de cores informando o status atual de cada kit.

☐ KIT Aberto ☐ Aguardando Processamento ☐ Aguardando Reprocessamento ☐ KIT Processado ☐ KIT Termodesinfetado ☐ KIT ExcluídoAtivos Data início Data fim 50 Nº do KIT Patrimônio Código KIT Filial Nome do KIT Solicitante/Proprietário Localização Busca pelo colaborador Tipos especiais Filtrar

Status	Div	KIT	Criado	Processado	Código	Tipo Especial	Tipo / Criado por	Solicitante/Proprietário	Etiqueta	Lista	Reprocesso	Relatório	Ação
		SMCK-893646	19/03/2020 09:28		123		PEQUENAS CIRURGIAS MASTER CME 19/03/2020 09:28	CME ARSENAL					
		SMCK-853606	04/02/2020 09:28		123		PEQUENAS CIRURGIAS ALEX 04/02/2020 09:28	CME ARSENAL					
		SMCK-840139	20/01/2020 16:12				TESTE TERMO FERNANDO 20/01/2020 16:12	CME ARSENAL					

Revisão #2

Criado 26 March 2020 13:11:46 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 5 October 2022 17:36:26 por GABRIEL BORGES PETERS