

Esterilização - Rotina Operacional

Criação e execução do procedimento de esterilização na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.

CRIAR LOTE

Caminho no Menu:

CME -> Esterilização -> Criar Lote

- 1.1 Com o leitor de código 2D, identifique o código do crachá no campo "Usuário";
- 1.2 Com o leitor de código 2D, identifique o código do "Equipamento" que efetuará o procedimento;
- 1.3 Selecione o ciclo de esterilização que será executado;
- 1.4 Clique em "Abrir lote".

A interface de usuário para a criação de um lote de esterilização. No topo, há uma barra de navegação com o texto "CME ESTERILIZAÇÃO" e o botão "ABRIR LOTE". No canto superior direito, há um botão "VOLTAR". Abaixo, há dois campos de entrada: "Usuário:" com o valor "****" e "Equipamento:" com o valor "S#T-254006". Abaixo desses campos, há uma caixa de texto que diz "AUTOCLAVE HORIZONTAL FACIOLI ID: 254006". Abaixo disso, há um campo de seleção com o valor "VAPOR" e um botão "ABRIR LOTE".

INCLUIR KIT NO LOTE

Caminho no Menu:

CME -> Esterilização -> Listagem-> Visualizar Lote

2.1 Com o leitor de código 2D, identifique o código *Data Matrix* da etiqueta de embalagem dentro do campo "Código do Kit";

Obs: Ao realizar a inclusão de Kits dentro do lote, o sistema irá calcular o total de litros dos Kits com base na configuração feita dentro do Kit Padrão, podendo ou não atingir a capacidade total da autoclave configurada dentro do Cadastro do Patrimônio.

2.2 Após incluir todos os Kits que serão esterilizados clique em "Iniciar Ciclo".

3.4 Confirme a operação identificando o código do crachá no campo "Identificação do usuário";

3.5 Insira o número do "Lote Interno" informado no equipamento;

CME ESTERILIZAÇÃO ITENS DO LOTE 26354

VOLTAR INICIAR CICLO

AUTOCLAVE HORIZONTAL FACIOLI

N. Patrimônio: 1236 ID: 254006

MASTER CME Abriu o lote em 19/03/2020 10:36

INCLUIR KIT

Código do KIT

OK

1 KIT(s) incluídos nesse LOTE

Patrimônio sem informação de capacidade em litros

Rastreabilidade

KIT	Volume	Link	Nome	Ação
SPCK-893646	5.75		PEQUENAS CIRURGIAS	

TOTAL DE LITROS DOS KITS: 0 Litros CAPACIDADE DE CARGA: 0 Litros

FINALIZANDO O CICLO

Caminho no Menu:

CME -> Esterilização -> Listagem -> Ações do lote

LOTE	Nº Interno	Criado	Processamento	Ciclo	Usuário	Equipamento	TAG	Código 2D	Nº Série	Nº patrimônio	Qtde itens	% de carga	Ação
26354	145	19/03/2020 10:36	ini: 19/03/2020 10:44	VAPOR	MASTER CME	AUTOCLAVE HORIZONTAL FACIOLI ESTERILIZAR CME ARSENAL				1236	1	0%	AÇÕES DO LOTE

3.1 Após a finalização do ciclo de esterilização, clique no botão "Ações do Lote" e selecione a opção correspondente ao resultado da esterilização.

3.2 Confirme a operação identificando o código do crachá no campo "Identificação do usuário".



AÇÕES DO LOTE 26354

O LOTE não poderá ser editado!

CICLO ENCERRADO COM SUCESSO!

CICLO ENCERRADO COM SUCESSO!

CICLO FALHOU!

EXCLUIR LOTE

Confirmar!

Cancelar!

Obs: Os lotes marcados como "Ciclo encerrado com sucesso" serão incluídos automaticamente no estoque do Arsenal, já os lotes marcados como "Ciclo falhou" e "Excluir lote" serão re-apresentados na tela de embalagem com status "Aguardando processamento".

Dúvidas

Dúvida	Solução	Direito
Na tela de criar lote de esterilização, não consigo identificar o usuário e o sistema apresenta a mensagem "IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO NÃO ENCONTRADA".	Solicite ao Administrador que revise e configure o campo "Identificação do Crachá" no Cadastro de Usuário - Listagem - Editar. O campo pode ser configurado com o conteúdo do código do crachá do colaborador ou criado uma identificação com base no ID do usuário no SISMETRO.	-
Na tela de criar lote de esterilização, não consigo identificar o equipamento e o sistema apresenta a mensagem "TIPO DE EQUIPAMENTO NÃO PERMITIDO"	Para criar um lote de esterilização deverá ser utilizado um tipo de equipamento permitido para esse processo, Ex: Autoclave Horizontal	-
Na tela de criar lote de esterilização, não consigo abrir lote pois o sistema apresenta a mensagem "SELECIONE UM CICLO!"	Para criar um lote de esterilização deverá ser configurado previamente os ciclos permitidos em: Menu CME - Configurações da CME - Ciclos	-

Revisão #10

Criado 19 March 2020 13:33:10 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 21 December 2022 00:29:04 por GABRIEL BORGES PETERS