

# Limpeza - Rotina Operacional

Criação de lote e execução do procedimento de limpeza na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização

## CAMINHO PADRÃO

Menu CME -> Limpeza

## CRIANDO LOTE DE LIMPEZA

### Caminho no Menu:

#### CME-> Limpeza-> Criar lote

- 1.1 Com o leitor de código 2D, identifique o código do crachá no campo "Usuário";
- 1.2 Com o leitor de código 2D, identifique o código do "Equipamento" que efetuará o procedimento;

A captura de tela mostra a interface de criação de um novo lote de limpeza. No topo, há uma barra de status com o texto "CME LIMPEZA NOVO LOTE" e uma mensagem de alerta em vermelho: "Atenção! O LOTE não pode ser editado!". No canto superior direito, há um botão "VOLTAR". Abaixo, há dois campos de entrada de texto. O primeiro campo, rotulado "Usuário:", contém o texto "Identificação do usuário". O segundo campo, rotulado "Equipamento:", está vazio.

Após a identificação do equipamento, será carregado as opções de ciclos de limpeza liberados nas configurações da CME.

- 1.3 Com o leitor de código 2D, identifique o "Código de Barra do Saneante" que será utilizado no procedimento;
- 1.4 Informe o "Lote do Saneante" que será utilizado no procedimento;
- 1.5 Clique em "Abrir Lote" e "Sim, criar o lote";

**CME LIMPEZA NOVO LOTE** Atenção! O LOTE não pode ser editado! VOLTAR

Usuário:

....

Equipamento:

S#T-156044

LAVADORA ULTRASSONICA ORTOSINTESE LVU35 ID: 156044  
Ciclo:

TERMO/ DESINFECÇÃO

Código Barra Saneante

Lote do Saneante

◀ Informe o Lote do Saneante

ABRIR LOTE

## INCLUIR ITENS NO LOTE

### Caminho no Menu:

### CME-> Limpeza-> Listagem -> Editar / Itens do lote

2.1 Com o leitor de código 2D, identifique a micro etiqueta *Data Matrix* do material no campo "Incluir item / Nome ou código do item";

Obs: deverão ser identificados todos os materiais que serão limpos no mesmo lote.

2.2 Clique em "Fechar Lote" e identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";

**CME LIMPEZA ITENS DO LOTE** 34067 MASTER 18/03/2020 11:19 VOLTAR DEL Multi FECHAR LOTE

Processado pela:  
**Equipe interna**

Rastreabilidade

Equipamento:  
LAVADORA ULTRASSONICA BRASMEDICAL RHOSSE FLOW CLEANING NS: 12.001.00

Saneante  
DETERGENTE ENZIMATICO

Lote do Saneante  
1

INCLUÍDOS  
1

INCLUIR ITEM  

Nome ou Código do item

OK

ITENS INCLUÍDOS NO LOTE

Data	ID	Tipo	Data Matrix	Item	Kit Padrão	Nome Kit Padrão	Lote Rec.	DEL Multi	Ação
18/03/2020 11:19	320907	2344	HL009937	PINCA ABADIE					✕

## INICIAR E FINALIZAR CICLO

### Caminho no Menu:

### CME -> Limpeza -> Listagem -> Iniciar ciclo / Finalizar ciclo

3.1 Clique no botão "Iniciar Ciclo" para iniciar o lote de limpeza;

3.2 Confirme a operação identificando o código do crachá no campo "Identificação do usuário";

CME LIMPEZA LISTAGEM 31 itens

CRIAR LOTE

LOTE Decrescente

Nº do LOTE

DataMatrix do item

Operador

20

Filtrar

Lote	Lote interno	Data Abertura	Equipe	Operador	Lavadora	Ciclo início	Ciclo fim	Qtde itens	Ação
34067		18/03/2020 11:19	Equipe interna	MASTER	LAVADORA ULTRASSONICA ▶151778			1	
34066		18/03/2020 10:34	Equipe interna	MASTER	LAVADORA ULTRASSONICA ▶151778			0	INICIAR CICLO

Após a finalização do procedimento, siga os passos abaixo:

3.3 Clique no botão "Finalizar Ciclo" para finalizar o lote de limpeza;

3.4 Confirme a operação identificando o código do crachá no campo "Identificação do usuário";

3.5 Insira o número do "Lote Interno" informado no display do equipamento ou, em caso de limpeza manual, desconsidere o campo e siga para o próximo passo;

3.6 Clique em "Sim, Finalizar!".

CME LIMPEZA LISTAGEM 33 itens

CRIAR LOTE

LOTE Decrescente

Nº do LOTE

DataMatrix do item

Operador

20

Filtrar

Lote	Lote interno	Data Abertura	Equipe	Operador	Lavadora	Ciclo início	Ciclo fim	Qtde itens	Ação
34130		19/03/2020 09:10	Equipe interna	MASTER	LAVADORA ULTRASSONICA ▶151778	19/03/2020 09:10		1	
34129		19/03/2020 09:09	Equipe interna	MASTER	LAVADORA ULTRASSONICA ▶151778			0	FINALIZAR CICLO

## Dúvidas

Dúvida	Solução
Na tela de criar lote de limpeza, não consigo identificar o usuário e o sistema apresenta a mensagem "IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO NÃO ENCONTRADA".	Solicite ao Administrador que revise e configure o campo "Identificação do Crachá" no Cadastro de Usuário - Listagem - Editar. O campo pode ser configurado com o conteúdo do código do crachá do colaborador ou criado uma identificação com base no ID do usuário no SISMETRO.
Na tela de criar lote de limpeza, não consigo identificar o equipamento e o sistema apresenta a mensagem "TIPO DE EQUIPAMENTO NÃO PERMITIDO"	Para abrir um lote de limpeza o operador deve utilizar um tipo de equipamento válido no processo de limpeza. Ex: "Lavadora Ultrassônica", "Termo Desinfectora", ou "Limpeza Manual".
Preciso excluir múltiplos itens de dentro do lote de limpeza?	Selecione os itens na caixa de seleção que se encontra ao final de cada item. Localize o botão de cor laranja nomeado "DEL Multi", no canto superior direito da tela. Basta confirmar para remover os itens selecionados.

Onde localizo o número do lote do saneante?	O número do lote do Saneante é informado na embalagem do produto próximo ao código de barras impresso na embalagem. Ao abrir um novo lote de limpeza e identificar o código do tipo de saneante o sistema irá sugerir automaticamente o último lote registrado.
Como registro um lote de limpeza manual?	É necessário que exista um patrimônio do tipo "Limpeza manual de instrumental" na categoria "Engenharia Clínica". Seu código deve ser identificado no campo "Equipamento" no momento da abertura do lote de limpeza.
Posso registrar a limpeza de materiais de vários KIT's juntos?	Sim, o processo de limpeza não se limita a configurações de KIT Padrão. A limpeza dos materiais pode ser registrada em conjunto sem a necessidade de separação por tipo.
Posso realizar a limpeza dos materiais e não registrar no SISMETRO?	Em conformidade com a Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012, para garantir a qualidade do processo de esterilização o sistema permite apenas a embalagem de materiais com limpeza registrada.

Revisão #23

Criado 19 March 2020 11:25:27 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 1 November 2022 13:44:23 por GABRIEL BORGES PETERS